

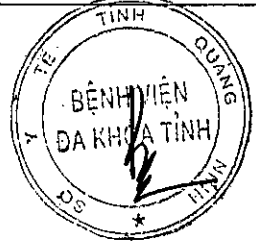
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

-----000-----



QUY TRÌNH
KHỬ KHUẨN BÌNH CHỮA NƯỚC R.O

Mã hiệu: QT HSTC-02
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 15/11/2022

Trách nhiệm	Soạn thảo	Kiểm tra	Phê duyệt
Chức vụ	Nhân viên khoa HSTC, CD-TNT	Trưởng khoa HSTC, CD-TNT	Giám đốc
Chữ ký			
Họ và tên	Đồng Văn Tô	Hà Mạnh Hùng	Nguyễn Bá Việt

100

१३३३

1. SECRET SECRET SECRET

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH	QUY TRÌNH	Mã : QT HSTC-02
	KHỬ KHUẨN BÌNH CHỨA NƯỚC R.O	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 15/11/2022
		Trang : 2/4

1. MỤC ĐÍCH

Nước có vai trò rất quan trọng trong lọc máu, không có nước không có lọc máu chu kỳ. Chất lượng nước ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả lọc máu và liên quan đến các biến chứng trước mắt và lâu dài ở bệnh nhân lọc máu.

Cũng như việc khử khuẩn hệ thống cấp nước cho chạy thận nhân tạo, việc khử khuẩn bình chứa nước thành phẩm R.O định kỳ góp phần đảm bảo chất lượng tốt cho lọc máu.

2. PHẠM VI

Áp dụng đối với khoa Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo, phòng Vật tư - Thiết bị y tế.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Quy trình kỹ thuật thận nhân tạo năm 2022

Quy trình rửa bồn chứa nước R.O trong hệ thống xử lý nước R.O cho thận nhân tạo.

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT:

Bình chứa nước R.O là bình chứa đựng nước R.O thành phẩm dùng để sử dụng trong lọc máu và rửa quả lọc.

Điều dưỡng: DD

Bác sĩ: BS

Phòng Vật tư kỹ thuật: phòng VT-TBYT

Khoa Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo: Khoa HSTC-TNT

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH	QUY TRÌNH	Mã : QT HSTC-02
	KHỬ KHUẨN BÌNH CHỨA NƯỚC R.O	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 15/11/2022
		Trang : 3/4

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

Trách nhiệm	Các bước thực hiện	Mô tả/tài liệu công việc
Điều dưỡng phụ trách TNT	Lên kế hoạch khử khuẩn bồn chứa nước R.O	+ Gửi lịch khử khuẩn cho BS trưởng khoa HSTC-TNT + Gửi lịch khử khuẩn cho phòng VT-TBYT + Giao nhiệm vụ cho điều DD theo dõi, giám sát và ghi chép đầy đủ công việc khử khuẩn bồn chứa.
Điều dưỡng	Mời phòng VT-TBYT khử khuẩn theo lịch	+ Chuẩn bị đầy đủ bảng kiểm, liên hệ phòng VT-TBYT để chuẩn bị công việc khử khuẩn bồn chứa
Cán bộ phòng VT-TBYT	Tiến hành khử khuẩn bồn chứa nước R.O	Bước 1: Khóa van đường cấp nước R.O và tháo rời liên kết với bồn chứa R.O
Điều dưỡng	Giám sát, ghi chép trong quá trình khử khuẩn bồn chứa R.O	Đánh dấu các bước theo quy trình vào bảng kiểm
Cán bộ phòng VT-TBYT	Tiến hành khử khuẩn bồn chứa nước R.O	Bước 2: Làm sạch bề mặt bằng nước R.O. Xả bớt nước R.O trong bồn chỉ để 1/4 bồn. Dùng bơm nước áp lực vào hút nước trong bồn và xịt rửa kỹ bồn, xả nhiều lần (2-3 lần)
Điều dưỡng	Giám sát, ghi chép trong quá trình khử khuẩn bồn chứa R.O	Đánh dấu các bước theo quy trình vào bảng kiểm
Cán bộ phòng VT-TBYT	Tiến hành khử khuẩn bồn chứa nước R.O	Bước 3: Ngâm khử trùng bằng hóa chất. Dùng Peracetic acid nồng độ 3,5%, làm đầy 1/4 bồn, dùng bơm cao áp xịt rửa kỹ bồn và ngâm trong 1 giờ. Sau đó xịt và xả sạch bồn bằng nước R.O
Điều dưỡng	Giám sát, ghi chép trong quá trình khử khuẩn bồn chứa R.O	Đánh dấu các bước theo quy trình vào bảng kiểm
Cán bộ phòng VT-TBYT	Tiến hành khử khuẩn bồn chứa nước R.O	Bước 4: Cho nước R.O vào 1/4 bồn, kiểm tra tồn dư Peracetic acid. Nếu hết hóa chất tồn dư, xả hết nước R.O. Sáng hôm sau bơm nước R.O 15-20 phút vào bồn, xả hết, trước khi xả kiểm tra lại hóa chất tồn dư lần cuối

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH	QUY TRÌNH	Mã : QT HSTC-02
	KHỬ KHUẨN BÌNH CHỨA NƯỚC R.O	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 15/11/2022
		Trang : 4/4

Điều dưỡng	Giám sát, ghi chép trong quá trình khử khuẩn bồn chứa R.O	Dánh dấu các bước theo quy trình vào bảng kiểm
Bác sĩ	Đọc kết quả test tồn dư	Phối hợp cùng phòng VT-TBYT, đọc kết quả test hóa chất tồn dư Kết quả âm tính cho kết nối lại đường nước R.O vào đường cấp R.O
Điều dưỡng	Giám sát, ghi chép trong quá trình khử khuẩn bồn chứa R.O	+ Ghi chép đầy đủ bảng kiểm, kết quả test + Ký biên bản bàn giao hệ thống nước R.O và bồn chứa R.O
Cán bộ phòng VT-TBYT	Ký biên bản bàn giao hệ thống nước R.O cho đơn nguyên TNT	+ Kiểm tra lại kết quả test hóa chất tồn dư + Ký biên bản bàn giao hệ thống nước R.O và bồn chứa R.O
Cán bộ phòng VT-TBYT	Tiến hành khử khuẩn bồn chứa nước R.O	Đầu lại đường nước R.O vào đường cấp R.O của bồn và cho hệ thống R.O hoạt động bình thường
Điều dưỡng	Theo dõi tình trạng bệnh nhân trong quá trình lọc máu	Báo cáo các trường hợp bất thường cho BS quản lý và BS trưởng khoa HSTC-TNT khi có trường hợp bất thường để xử trí tiếp theo.

6. BIỂU MẪU/PHỤ LỤC

TT	Mã hiệu	Tên Biểu mẫu / Phụ lục
1.		

7. HỒ SƠ LƯU TRỮ

TT	Tên hồ sơ	Nơi lưu
1.	Kế hoạch khử khuẩn bồn chứa nước R.O	Khoa Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo, phòng VT- TBYT
2.	Bảng kiểm theo dõi, giám sát khử khuẩn bình chứa nước R.O	
<u>Lưu ý:</u> Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.		